

# HemoClin

spray

## HemoClin® Aambeien Spray

- Snelle verkoelende verlichting bij uitwendige aambeien en anale ongemakken (zoals jeuk, irritatie, branderigheid en gevoeligheid)
- Verzorgt de huid en ondersteunt het natuurlijke genezingsproces
- Voor uitwendig gebruik
- Hygiënisch en gemakkelijk aan te brengen
- Speciaal aanbevolen als aanvulling op de HemoClin® Gel (voor inwendige en uitwendige aambeien)

**Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor u het product gaat gebruiken. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg. Indien u vragen heeft, of indien iets niet geheel duidelijk is, neem contact op met uw arts of apotheker.**

### Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:

1. Waarvoor gebruikt u HemoClin® Spray?
2. Wat zijn de bestanddelen van HemoClin® Spray?
3. Wat doen de werkzame ingrediënten?
4. Wat moet u weten voor u HemoClin® Spray gebruikt?
5. Wanneer gebruikt u HemoClin® Spray?
6. Hoe gebruikt u HemoClin® Spray?
7. Hoe bewaart u HemoClin® Spray?
8. Wanneer dient u de aambeien spray niet te gebruiken?
9. Wat bevat deze verpakking?
10. Contactgegevens

#### 1. Waarvoor gebruikt u HemoClin® Spray?

HemoClin® Spray wordt toegepast bij uitwendige aambeien en anale ongemakken (zoals jeuk, irritatie, branderigheid en gevoeligheid). Aambeien en andere anale ongemakken komen onder andere veelvuldig voor tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

#### 2. Wat zijn de bestanddelen van HemoClin® Spray?

Aqua, Aloë barbadensis, Polyglucuronic Acid Crosspolymer\*, Hamamelis virginiana, PEG-8, Xanthan Gum, Galactoarabinan Methyl Diisopropyl Propionamide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium Hydrogen Phosphate 12H<sub>2</sub>O, Sodium Dihydrogen Phosphate 2H<sub>2</sub>O, Parfum (Cucumis sativus fruits). \*2QR

Dit product bevat geen irriterende chemische stoffen en geen stoffen van dierlijke herkomst.

#### 3. Wat doen de werkzame ingrediënten?

HemoClin® Spray is effectief in het voorkomen en behandelen van anale ongemakken zoals aambeien, jeuk, irritatie en branderigheid. De spray biedt snelle verkoelende verlichting van uitwendige aambeien en andere anale ongemakken.

1. HemoClin® Spray bevat een natuurlijke vloeistof gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex. Dit werkzame bestanddeel is afkomstig van de Aloë barbadensis plant (Aloë vera). 2QR blokkeert het nestelen van schadelijke bacteriën, ondersteunt het natuurlijke genezingsproces en verzorgt het weefsel.



2. Aqua hamamelidis (Hamameliswater) werkt verkoelend en huidherstellend.

#### 4. Wat moet u weten voor u HemoClin® Spray gebruikt?

- Het gebruik van HemoClin® Spray heeft voor zover bekend geen bijwerkingen.
- Bij aanhoudende last van aambeien of overmatig bloedverlies, neem eerst contact op met uw arts.
- Er is geen interactie met andere medicaties bekend.



# HemoClin

spray

## 5. Wanneer gebruikt u HemoClin® Spray?

- Voor de behandeling van uitwendige aambeien en andere anale ongemakken (zoals jeuk, irritatie, branderigheid en gevoeligheid):

Minimaal tweemaal per dag aanbrengen rondom de anus gedurende een periode van twee weken of wanneer verlichting gewenst is. Regelmatiger aanbrengen verhoogt de werkzaamheid.

- Ter voorkoming van anale kloofjes en infecties: Aanbrengen rondom de anus voor en na iedere stoelgang.

Gebruik HemoClin® Spray zo vaak u wenst, iedere keer dat u uitwendige anale ongemakken (zoals irritatie, jeuk, branderigheid en gevoeligheid) ervaart of wenst te voorkomen.


Bij inwendige aambeien raden wij aan daarnaast HemoClin® Aambeien Gel te gebruiken.

## 6. Hoe gebruikt u HemoClin® Spray?

### Om HemoClin® Spray aan te brengen:

**Stap 1.** Verwijder het dopje van de spray-kop.

**Stap 2.** Voor het eerste gebruik enkele malen in de lucht sprayen om de spraykop te vullen.

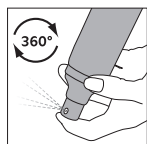

**Stap 3.** Kijk voor gebruik goed naar de positie van de opening van de spray. De spray kan worden gebruikt vanuit elke gewenste hoek.

**Stap 4.** Buk enigszins naar voren en spreid desgewenst uw billen zodat de anus makkelijker te bereiken is.

**Stap 5.** Richt de opening van de spray op de anus en spuit 1 tot 2 maal op en rondom de anus.

**Stap 6.** Breng na gebruik de dop weer aan op de spray en was uw handen.

## 7. Hoe bewaart u HemoClin® Spray?

HemoClin® Spray gebruiken op kamertemperatuur. Bewaren op een koele en veilige plek en buiten bereik van kinderen.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum vermeld op de bovenzijde van de tube en op de onderzijde van het doosje.

## 8. Wanneer dient u de aambeien spray niet te gebruiken?

Indien er een overgevoeligheid is voor één of meerdere van de componenten.


## 9. Wat bevat deze verpakking?

- Een tube met spray van 35 ml
- Gebruiksaanwijzing

## 10. Contactgegevens

Distributeur Nederland/België:

**Bioforma BV**, J.P. Broekhovenstraat 16,  
8081 HC Elburg, Nederland

Fabrikant:  X You Medical, Van Breestraat 107 BG,  
1071 ZJ Amsterdam, Nederland

Voor meer informatie over HemoClin® Spray of Gel kijk dan op [www.hemoclin.nl](http://www.hemoclin.nl) of bel met de HemoClin informatielijn: 0800 - 44 55 667 (10 ct/min)



CE 0086

10A1  
07782220