



## HemoClin®

- Alivio instantáneo contra las hemorroides y el malestar anal. (p.ej. irritación, picor, quemazón, sensibilidad)
- Trata y previene el malestar anal.
- Previene la reaparición de hemorroides y de fisuras anales.
- Reacondiciona la piel y ayuda al proceso natural de cicatrización.
- Sistema de aplicación cómodo y limpio.

**Lea atentamente las instrucciones de uso antes de empezar a utilizar el producto. No tire el prospecto. Si tiene alguna pregunta o si no está seguro de su utilización, consulte a su médico o farmacéutico.**

### Contenido del prospecto:

¿Para qué sirve HemoClin®?

¿Qué contiene HemoClin®?

¿Qué debe saber antes de utilizar HemoClin®?

¿Cuándo y cómo debe utilizar HemoClin®?

¿Cómo debe ser conservado HemoClin®?

¿Qué contiene el envase?

Detalles de contacto

¿Para qué sirve HemoClin®?

HemoClin® trata el malestar anal y se utiliza para aliviar los síntomas de irritación, picor, quemazón y sensibilidad asociados a las hemorroides. HemoClin® previene y trata el malestar anal, las hemorroides y otras molestias anales frecuentes, incluso durante el embarazo y después del parto.

¿Qué contiene HemoClin®?

• **¿Qué contiene el gel?**

Este paquete de HemoClin® contiene 45 ml de un gel natural no tóxico. Este gel está basado en el complejo patentado bioactivo 2QR, derivado de la planta Aloe Barbadensis. Este producto no contiene fragancias ni ingredientes de origen animal.

• **¿Qué hacen los ingredientes activos de este producto?**

HemoClin® es efectivo en la prevención y tratamiento de molestias anales tales como picor, irritación, quemazón y sensibilidad. El gel bioactivo ofrece un alivio rápido para las hemorroides, las fisuras y el malestar anal. El ingrediente bioactivo denominado 2QR neutraliza los microbios dañinos, ayuda al proceso natural de cicatrización y acondiciona el tejido. HemoClin® también aporta una fuerte lubricación para facilitar la defecación.

¿Qué debe saber antes de utilizar HemoClin®?

HemoClin® no contiene ninguna sustancia química tóxica fuerte. No se han descrito efectos secundarios durante la utilización de HemoClin®.

• **Por favor, consulte primero con su médico si:**

Usted sufre continuamente de hemorroides o de sangrado excesivo.

• **Utilización de otros medicamentos:**

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

¿Cuándo y cómo debe utilizar HemoClin®?

• **Para el tratamiento del malestar anal (p.ej. irritación, picor, quemazón, sensibilidad):**


Aplicar generosamente dentro y alrededor del ano al menos dos veces al día durante un periodo de 2 semanas, o cuando se requiera alivio. Aplicaciones frecuentes incrementan la eficacia.

• **Para la prevención de hemorroides y fisuras:**

Aplicar dentro y alrededor del ano antes y después de la defecación.


HemoClin® no debe usarse más de 30 días consecutivos.

## ATENCIÓN

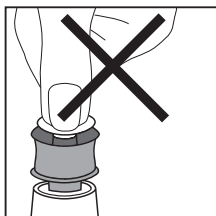


No apriete el botón blanco


## ¿Qué componentes forman parte del aplicador?

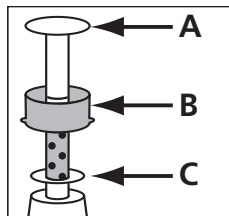

Componentes

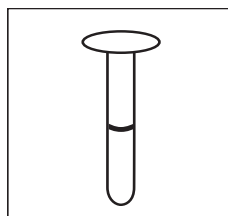


Parte A (blanca)

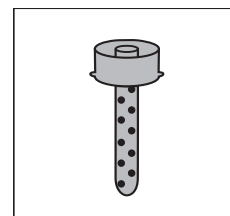

Parte B (azul)


Para aplicar HemoClin® siga las instrucciones de uso indicadas en los siguientes gráficos:

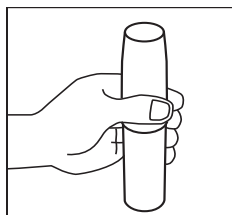

**Paso 1.** Coloque el aerosol sobre una superficie sólida. Mantenga el envase del aerosol cogido con una mano.




Presionar firmemente 2 seg. hacia abajo

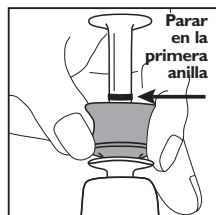

Parar en la primera anilla


**Paso 2.** Presione **firmemente** sobre la **parte B (azul)** durante 2 segundos con la otra mano. Escuchará un silbido. La **parte A (blanca)** se desplazará **automáticamente** hacia arriba. Mantenga presionada la **parte B** hasta que aparezca **una anilla** en la **parte A**. Deje de presionar. **El aplicador está cargado y preparado para utilizarse.**

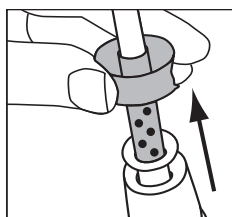

**Paso 3.** Extraiga conjuntamente la **parte B** y la **parte A** del dispositivo de sujeción (**parte C**).



**Paso 4.** Introduzca la **parte B** junto con la **parte A** en el interior del recto.

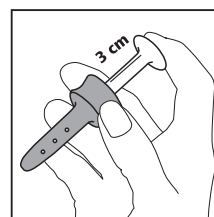

**Paso 5.** Después de insertar la **parte B** en el interior del recto, presione la **parte A** hacia dentro de la **parte B**, permitiendo la entrada de HemoClin® en el área afectada.

## Instrucciones de limpieza:

Después de cada uso, lavar la parte A y parte B por separado con agua caliente.

Utilice HemoClin® tantas veces como considere oportuno, cada vez que experimente o desee prevenir los malestares anales tales como irritación, picor, quemazón y sensibilidad.

## ¿Cómo debe ser conservado HemoClin®?

HemoClin® debe ser utilizado a temperatura ambiente. Guárdelo en un lugar seguro y fresco. No lo utilice pasada la fecha de caducidad indicada en la parte inferior de HemoClin® y en el embalaje externo.

## ¿Qué contiene el envase?

- Dispensador aerosol de 45 ml con un aplicador
- Prospecto explicativo

## Atención: Contenedor presurizado

No perforar ni quemar, incluso después del uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Distribuidor:

Chefaro Española S.A.  
Plaza Xavier Cugat 2, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona, España  
Atención al Cliente: 902 888 597

## Fabricante: YouMedical

YouMedical, PO box 69290, 1060 CH Amsterdam, Países Bajos

Cualquier pregunta sobre el producto debe dirigirse a Chefaro Española S.A.

Para más información sobre HemoClin® visite [www.hemoclin.com](http://www.hemoclin.com)

CE 0344

09-2006  
59-34035-0600  
patented